



RUCK®

FÜR FUSS UND PFLEGE

Behandelstoel **MOON**


TRANSPORTBEVEILIGING



WAARSCHUWING!!!

LEES A.U.B. DEZE HANDLEIDING VOOR DE DEMONTAGE VAN DE TRANSPORTBEVEILIGING **VÓÓR HET IN GEBRUIK NEMEN** EN VOER DE DAARIN BESCHREVEN STAPPEN ZORGVULDIG UIT!!!

BIJ HET NIET IN ACHT NEMEN DREIGT BESCHADIGING VAN UW BEHANDELSTOEL EN UITSLUITING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID!

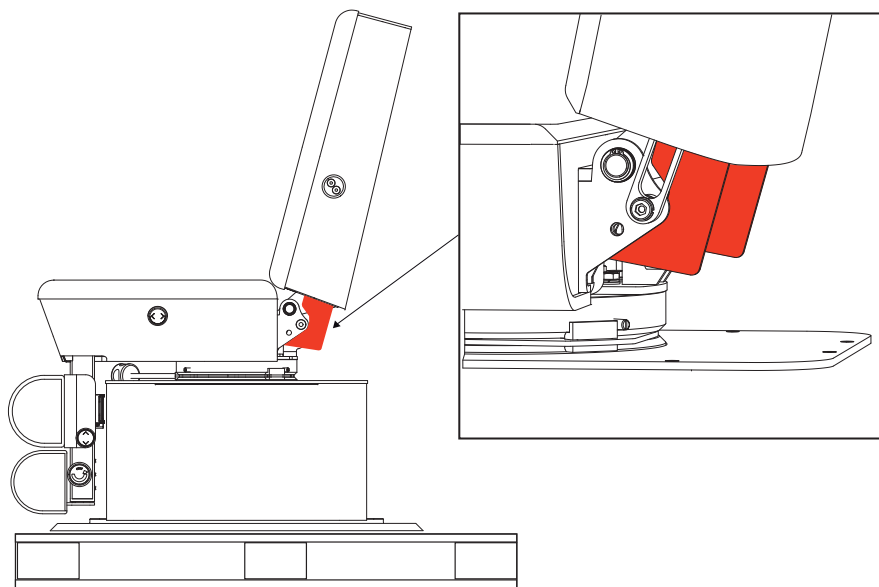

8010204 | Gebruiksaanwijzing transportbeveiliging | REV 02 | Laatste herziening 04.08.2020



TOELICHTING BIJ DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Hellmut Ruck GmbH behoudt zich alle rechten tot wijziging en aanvulling van deze gebruiksaanwijzing voor. Hellmut Ruck GmbH heeft er veel aandacht aan besteed om deze handleiding vrij van onnauwkeurigheden en nalatigheden te houden. Mocht u fouten of onnauwkeurigheden tegenkomen, informeer ons dan a.u.b. Er bestaat echter van de kant van Hellmut Ruck GmbH geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in deze gebruiksaanwijzing en voor daaruit resulterende gevolgschade die door het ter beschikking stellen van deze gebruiksaanwijzing of het gebruik ervan tijdens het gebruik van het product ontstaat.

Het doorgeven en aanvullen van deze gebruiksaanwijzing is niet toegestaan, voor zover dit niet door Hellmut Ruck GmbH uitdrukkelijk is toegestaan.

GEBRUIKTE SYMBOLEN



Dit symbool wijst op een gevaar voor mens of product. Het moet beslist in acht worden genomen.



Dit symbool wijst op handige tips. Op deze plaats wordt aanvullende informatie over het product en de bediening ervan gegeven.



HELLMUT RUCK GmbH | Daimlerstraße 23 | D-75305 Neuenbürg, Germany
web www.hellmut-ruck.de | fon +49 (0)7082. 944 20 | fax +49 (0)7082. 944 22 22

Copyright

© 2020 Hellmut Ruck GmbH. Alle rechten voorbehouden. Dit document mag zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Hellmut Ruck GmbH niet gekopieerd, bewerkt, vervoelvoudigd of vertaald worden.




WAARSCHUWING!

De behandelstoel mag uitsluitend aan de beide armleuningbevestigingen aan de zijkant van de rugleuning met ingebouwde transportbeveiliging worden bewogen. De beide rode transportbeveiligingen moeten gemonteerd zijn tijdens het transport en het opstellen, en bij het eronder leggen van de nivelleringspads op de behandelstoel.


Bewaar de transportbeveiligingen voor latere verhuizingen. Beveilig de stoel daarmee opnieuw, ook als u de positie binnen de plaats van opstelling wilt veranderen. Wij geven u graag advies voor het hernieuwde transport van uw behandelstoel in het kader van een verhuizing.

Bij het niet in acht nemen kan de behandelstoel beschadigd raken


BIJ HET NIET IN ACHT NEMEN DREIGT UITSLUITING VAN GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID!

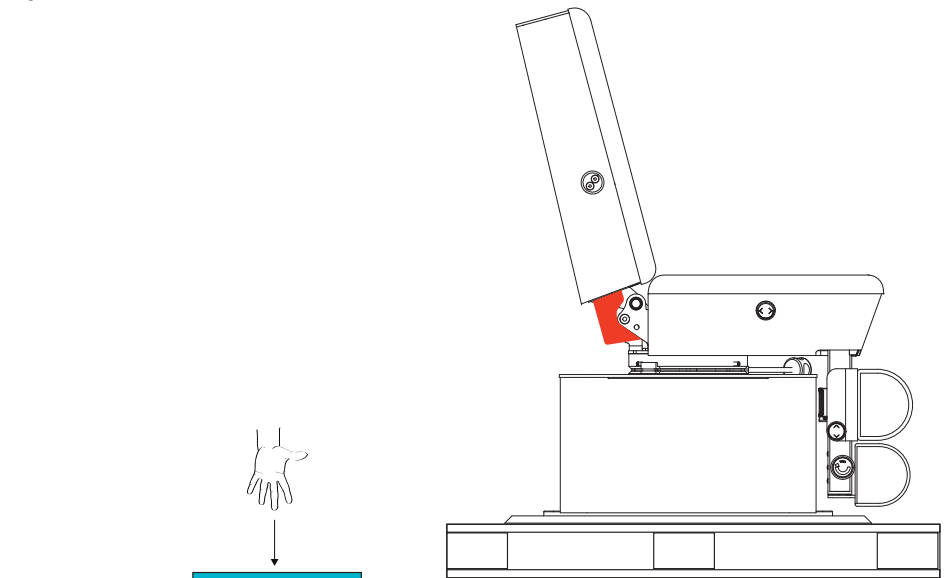


1. Voor het afladen van de behandelstoel legt u ter bescherming van de bodemplaat een beschermende onderlegger (bijv. voetmat) vóór de pallet.

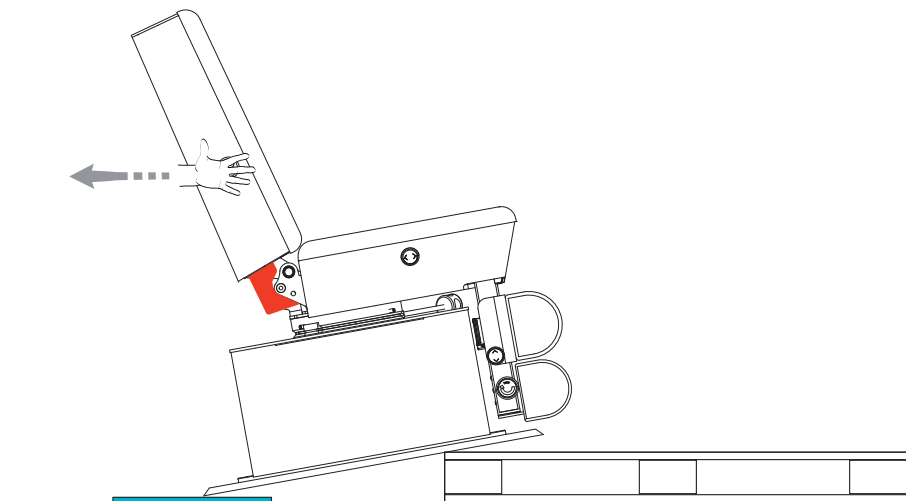


2. Pak de beide armleuningbevestigingen vast zoals afgebeeld, rechts-/links aan de rugleuning. Trek de behandelstoel in de richting van de pijl van de pallet tot de bodemplaat op de beschermende onderlegger zit.

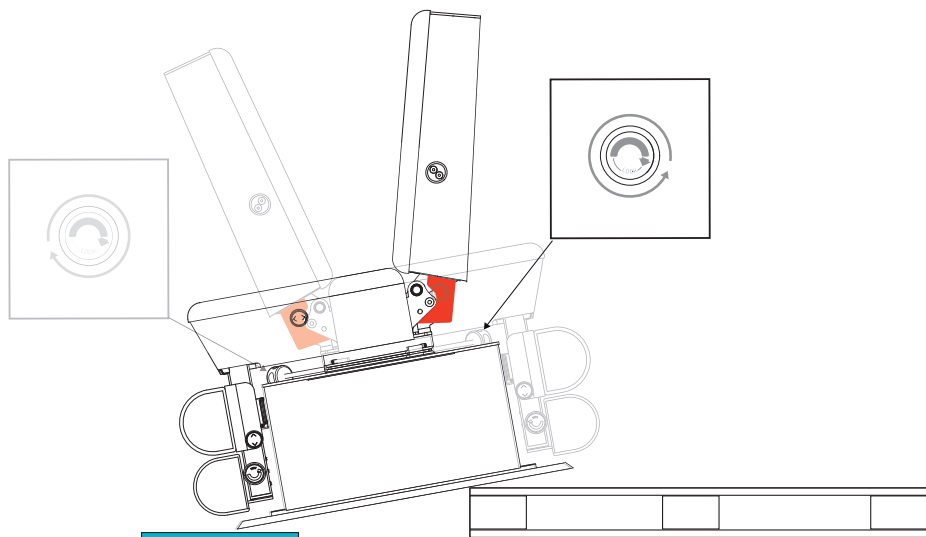


3. Om ervoor te zorgen dat de voetsteunen tijdens het neerzetten niet met de pallet in aanraking komen, draait u de behandelstoel 180°. Open daarvoor het handwiel voor de rotatie.

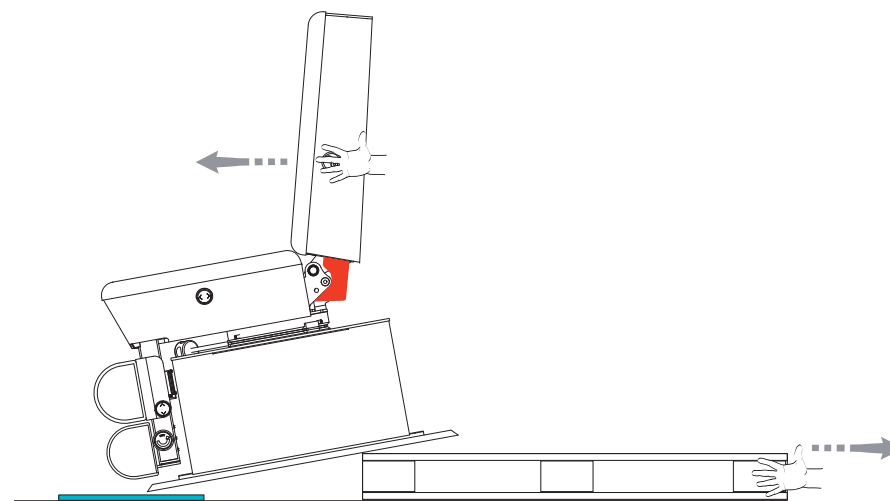


4. Pak de beide armleuningbevestigingen vast zoals afgebeeld, rechts-/links aan de rugleuning. Til de behandelstoel op en laat de pallet door een tweede persoon onder de behandelstoel wegtrekken.

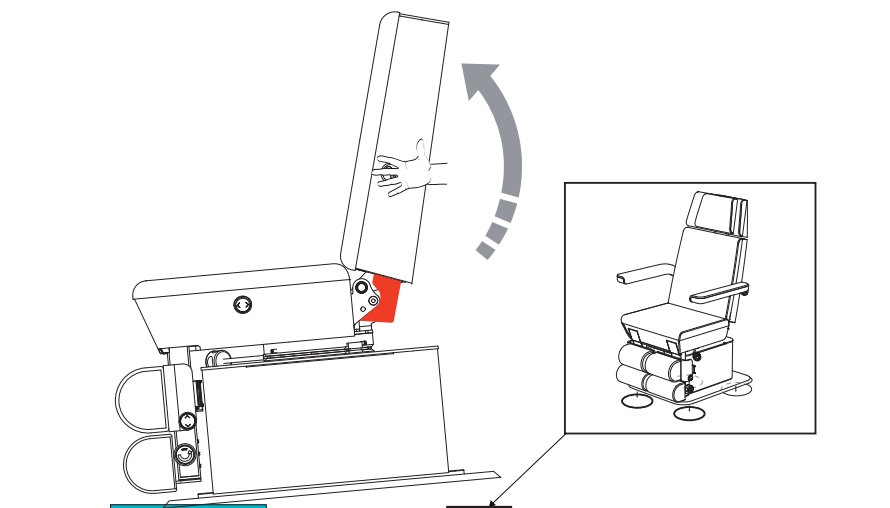


5. Pak de beide armleuningbevestigingen vast zoals afgebeeld, rechts-/links aan de rugleuning. Til de behandelstoel op en laat door een tweede persoon twee nivelleringspads onder de bodemplaat leggen.

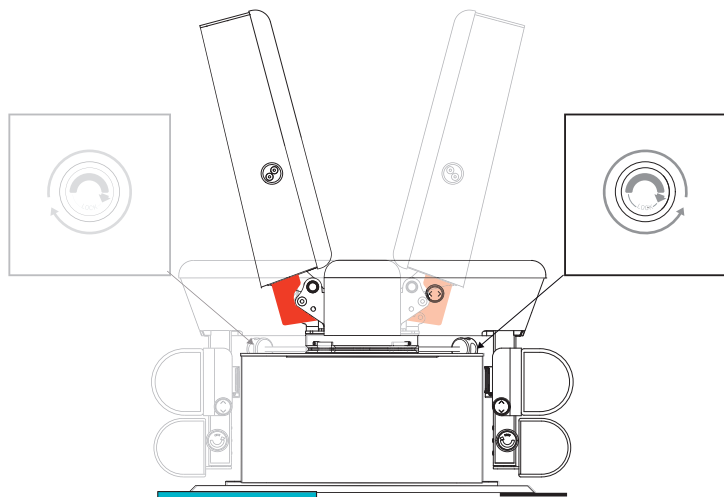


6. Draai de behandelstoel 180°.

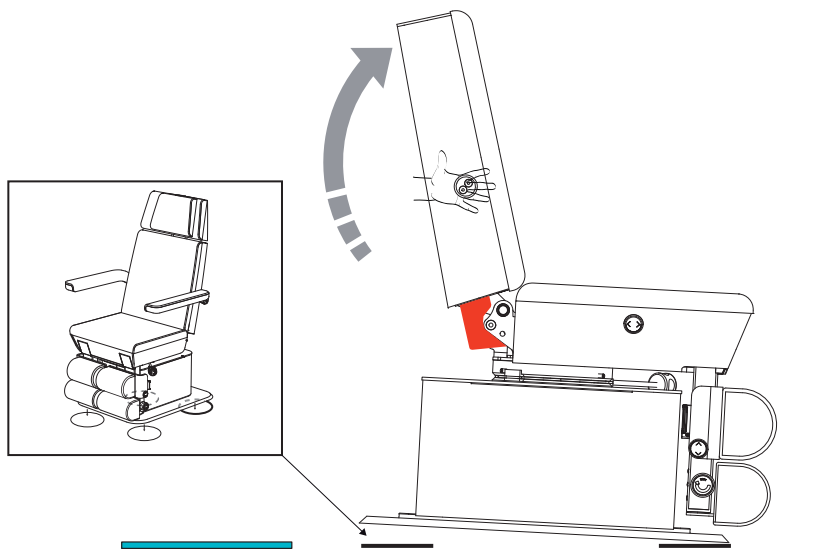


7 Pak de beide arMLEUNINGBEVESTIGINGEN vast zoals afgebeeld, rechts-/links aan de rugleuning. Til de behandelstoel op en laat door een tweede persoon twee nivelleringspads onder de bodemplaat leggen.

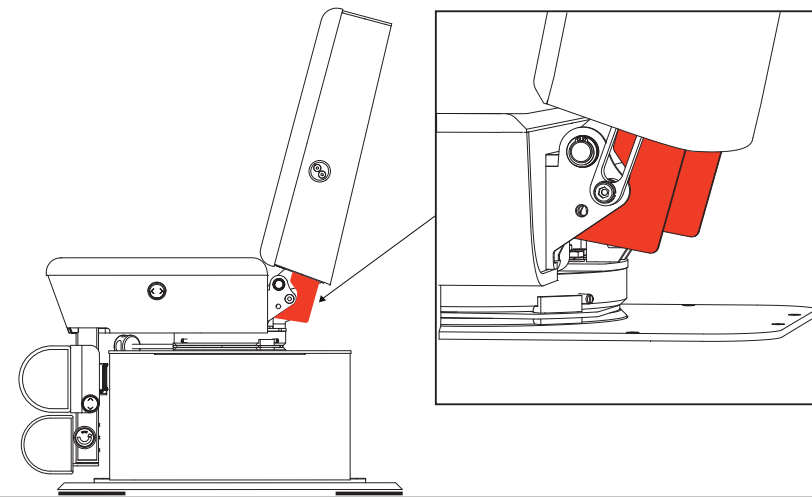

8. De beide rode transportbeveiligingen moeten vóór het in gebruik nemen van de behandelstoel worden gedemonteerd. Bij het niet in acht nemen kan de rugleuning niet gekanteld worden, aandrijving en/of zitting en rugleuning kunnen daarbij worden beschadigd.

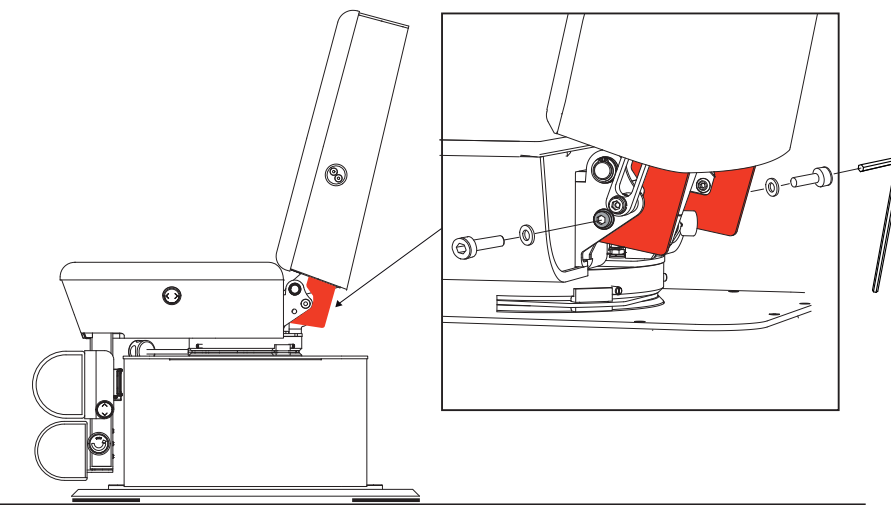

9. Voordat u met de demontage van de transportbeveiliging begint, beschermt u de houten afdekking van de hefbekleding en de bodemplaat van de behandelstoel. Draai met een inbusleutel de inbusbout los, elk rechts/links en verwijder deze met de bijbehorende onderlegging.

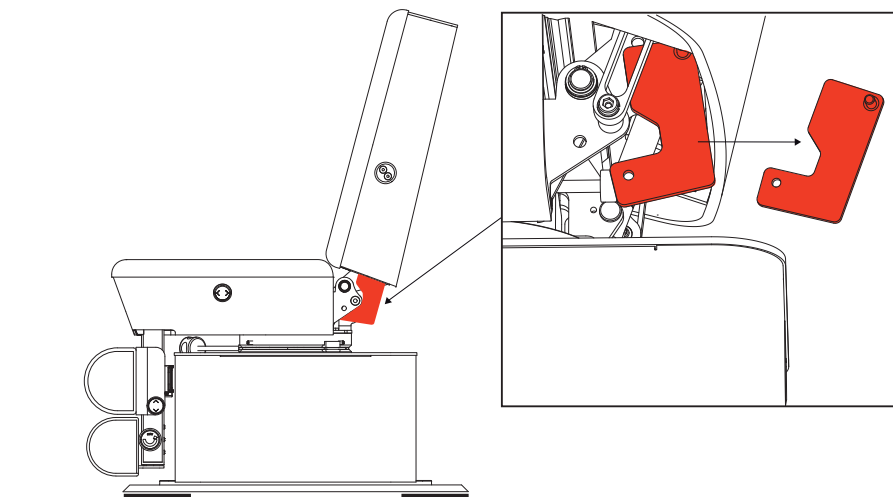

10. De transportbeveiliging kan nu makkelijk naar beneden gedraaid en eraf genomen worden.



Bewaar de transportbeveiligingen voor latere verhuizingen. Beveilig de stoel daarmee opnieuw, ook als u de positie binnen de plaats van opstelling wilt veranderen - pas daarvoor punt 8-10 in omgekeerde volgorde toe.

RUCK[®]
FÜR FUSS UND PFLEGE

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23
D-75305 Neuenbürg
fon +49 (0)7082. 944 20
fax +49 (0)7082. 944 22 22

E-mail kontakt@hellmut-ruck.de
web www.hellmut-ruck.de