



www.die-hygiene-experten.de

Wir empfehlen die RUCK® Instrumentendesinfektion PLUS Art.-Nr.: 2940901 (2L) / 2940902 (5L),
die RUCK® Instrumentendesinfektion Fertiglösung Art.-Nr.: 2968701 (2L) / 2968702 (5L),
sowie das RUCK® Instrumentendesinfektion Konzentrat Art.-Nr.: 2968601 (2L) / 2968602 (5L)



RUCK®

FÜR FUSS UND PFLEGE

HELLMUT RUCK GmbH
Daimlerstraße 23
D- 75305 Neuenbürg
fon + 49 (0)7082 944 20
fax + 49 (0)7082 944 22 22

e-Mail kontakt@hellmut-ruck.de
web www.hellmut-ruck.de



RUCK®
FÜR FUSS UND PFLEGE

PODOLOGSONIC



8011801 | Kompaktanleitung | REV 10 | Überarbeitungsstand 05.06.2020



Liebe Kundinnen und Kunden,

Sie haben sich für den Kauf eines Gerätes aus der PODOLOG SONIC-Serie entschieden.

Neues Design – neue Ideen – bewährte Technik. Einfachste Bedienung bei höchster Effizienz waren die Kriterien und das Ergebnis ist beeindruckend: Bei allen Geräten regeln Sie mit nur einem Drehregler alle Funktionen. Enorme Zeitersparnis durch gleichzeitige Reinigung und Desinfektion

in nur fünf Minuten. SweepTec-Technologie zur gleichmäßigen Schallverteilung im Bad und damit besserem Reinigungsergebnis. Gehäuse, Schwingwanne und Instrumentenkorb aus Edelstahl. Erweiterte RUCK Gewährleistung von 3 Jahren. Alle Geräte sind als Medizinprodukt Klasse 1 zugelassen. Die PODOLOG SONIC-Serie bietet ein Maximum an Qualität "made in Germany".

Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken wir uns hiermit herzlich, und wünschen Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit viel Freude mit unserem Produkt. Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme die beiliegende Gebrauchswweisung der Firma Bandelin aufmerksam durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

Ihre HELLMUT RUCK GmbH

3 Jahre
Gewährleistung

✓

Exklusiv bei RUCK auf alle
PODOLOG SONIC-GERÄTE

QUALITÄT
SEIT ÜBER

90
JAHREN

GEFERTIGT IN
DEUTSCHLAND

Medizinprodukt der Klasse 1

Ultraschallbad	Schwingwanne innen (L × B × T)	Arbeitsfüll- menge	Ultraschall-Spitzenleistung* / HF-Leistung	Gewicht (netto)	Stromaufnahme (230 V)	Sicherungen
	mm	l	W / Weff	kg	A	
Podolog S	190 × 85 × 60	0,6	160 / 40	2,2	0,2	T1A
Podolog M	240 × 140 × 100	2,0	320 / 80	3,4	0,4	F2A
Podolog XL	300 × 240 × 65	2,5	560 / 140	5,5	0,7	F2A


* Zur Verbesserung der Wirkung wird der Ultraschall moduliert, wodurch sich ein 4-facher Wert der HF-Leistung als Ultraschall-Spitzenleistung ergibt.

Kompaktanleitung (Bitte lesen Sie die vollständige Anleitung der Firma Bandelin - im Lieferumfang enthalten)

Darstellung auf dem Gerät



Darstellung in der beiliegenden Gebrauchsanweisung von BANDELIN

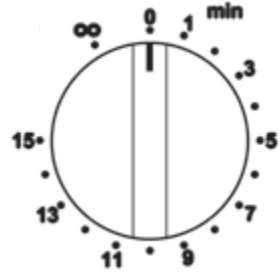

01 Reinigungsdauer

Grundsätzlich ist die Reinigungsdauer so kurz wie möglich einzustellen. Je nach Verschmutzung und verwendeter Reinigungsflüssigkeit (Angaben auf den jeweiligen Etiketten beachten) beträgt die Reinigungsdauer ca. 1 bis 15 min.

02 Dauerbetrieb-Stellung ∞/↺:

- Drehknopf auf Symbol ∞/↺ einrasten.
- Gerät schaltet nicht automatisch ab, zum Ausschalten Drehknopf auf "0" zurückstellen.

03 Kurzzeitbetrieb

- Drehknopf auf gewünschte Reinigungszeit einstellen.
- Schaltuhr schaltet nach Ablauf der Zeit automatisch ab. Durch Zurückdrehen kann die Reinigungszeit verkürzt bzw. das Gerät ausgeschaltet werden.

04 Hinweise zur Uhr:

Im ausgeschalteten Zustand kann das Gerät am Netz angeschlossen bleiben. Eine Netztrennung erfolgt durch Ziehen des Netzsteckers.

Für die Prüfung eines Ultraschallbades wird vierteljährlich ein Folientest empfohlen.

2662001 Folientest für PODOLOG SONIC S | 2662002 Folientest für PODOLOG SONIC M | 2662003 Folientest für PODOLOGSONIC XL