


Wechsel der Etikettenrolle - step by step - Anleitung


RUCK® Auszeichnungsgerät für Sterilisationsgut, 26441 Ersatzetiketten, 26440 Auszeichnungsgerät



Ersatzetikettenrolle für RUCK® Auszeichnungsgerät bereitlegen.

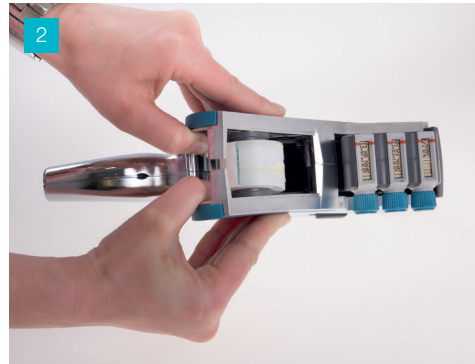

Rückseite des Etikettenrollenhalters auseinanderdrücken.

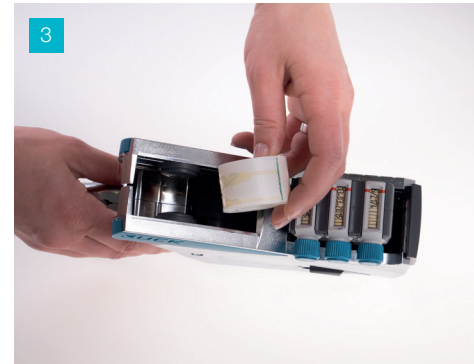

Leere Etikettenrolle entnehmen.



Ersatzetikettenrolle mit Etiketten nach oben einlegen.



Etikettenrollenhalter auseinanderdrücken und Ersatzetiketten fixieren.



Um das Gerät zu öffnen, grauen Kunststoffverschluss zurückziehen.



Auszeichnungsgerät öffnet sich.



Ersatzetiketten in den Führungsschacht einfädeln.

Wechsel der Etikettenrolle - step by step - Anleitung

RUCK® Auszeichnungsgerät für Sterilisationsgut, 26441 Ersatzetiketten, 26440 Auszeichnungsgerät

RUCK®
FÜR FUSS UND PFLEGE



Ersatzetiketten durch das Gerät ziehen.



In die Abrollvorrichtung einfädeln (Siehe Pfeil Unterseite Gerät).



Gerät wieder schließen.



Etikettenrolle zurückziehen bis das Band straff anliegt.



Bediengriff mehrfach durchdrücken. Etikettenrolle fädelt sich in die Abrollvorrichtung ein. Auszeichnungsgerät ist betriebsbereit.

Videotipp



www.hellmut-ruck.de