

Bectid Premium

Konzentrat

Anwendungsbereich

Für umfassenden mikrobiziden Schutz auf nasswischbaren Oberflächen. Auch empfohlen zur täglichen antimikrobiellen Reinigung von Einrichtungen und Fußböden zur Erreichung eines hohen Hygienestandards in der Praxis.

Anwendung

Zur Herstellung einer 1%igen Gebrauchslösung 990 ml Leitungswasser mit 10 ml Bectid Premium Konzentrat vermischen. Entfernen Sie zunächst schwere Schmutzablagerungen von der Oberfläche. Dann die Oberfläche gründlich mit der entsprechenden Verdünnung des Konzentrats vollständig benetzen. Aufgetragen werden kann mit Tüchern oder Wischmop. Anschließend Spülen oder trocknen lassen. Einwirkzeiten beachten. Empfohlene Wasserqualität zum Verdünnen < 8,4° dH. Bereiten Sie täglich eine frische Gebrauchslösung zu. Wenn die Gebrauchslösung eine sichtbare Verschmutzung oder Verdünnung aufweist, dann sollte öfters eine Gebrauchslösung zubereitet werden.

Wirkungsspektrum / Eigenschaften

- wirkt bakterizid (inkl. MRSA) in 3% / 5min und in 0,25% / 60min (EN 13727)
- wirkt levurozid in 0,1% / 5min und in 0,1% / 60min (EN 13624)
- getestet nach den Richtlinien der DGHM (Stand 4/2015) unter hoher organischer Belastung und gelistet bei der VAH
- wirkt fungizid (A.brasiliensis) in 6% / 60min (EN 13624)
- effektiv gegen Mykobakterien (inkl. TB) in 2% / 30min (EN 14348)
- effektiv gegen Sporen in 4% / 60min (EN 13704)
- inaktiviert behüllte Viren (HBV/HCV/HIV/Vaccinia-virus/Ebola/H1N1) in 0,5% / 5min (EN 14476)
- vollständige Viruzidie (Adeno/Polio/Noro) in 5% / 60min (EN 14476)
- desinfiziert, reinigt und schützt
- pH-Wert: ~ 12



Zusammensetzung

100g Bectid Premium Konzentrat enthalten:

- 6,5g Didecyl dimethyl ammonium chlorid
- 5,3g Bis (3-aminopropyl) dodecylpropan-1,3-diamin

Lieferform

REF 533 1-Liter Flasche
REF 533.5 5-Liter Kanister

Hinweis

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nach Anwendung ist kein Abspülen notwendig.

Haltbarkeit

24 Monate

Zubehör

REF 567.1 Dosierpumpe für
1 Liter Flasche

REF 567.5 Dosierpumpe für
5 Liter Kanister



Hersteller

Alfred Becht GmbH
Carl-Zeiss-Str. 16
D-77656 Offenburg
Tel.: +49 781 60586-0
Fax.: +49 781 60586-40
Germany
www.becht-online.de